


## フェイスシールド

### 【ご試着方法】

シールド部分を前にして  
上から被って頭に固定してください。

### 【使用上の注意】

- ・上記の用途以外には使用しないでください。
- ・ご使用前に保護フィルムを外してください。
- ・取扱いは十分注意し、投げたりしないでください。
- ・着用前にゴムバンドの締め付けや緩みに問題はないか確認してください。
- ・製品の改造はしないでください。
- ・正面からの飛沫を防ぎます。マスクを合わせて使用するのが効果的です。
- ・本製品は有毒ガスや粉塵、ウイルスの侵入は防げません。
- ・フィルム面に汚れが付いている場合は、軽く水洗いし柔らかい布で拭き取ってください。
- ・幼児の手の届かない所で保管してください。
- ・かゆみやかぶれ等が出た場合は直ちにご使用をやめてください。
- ・自動車等、運転時の着用はしないでください。

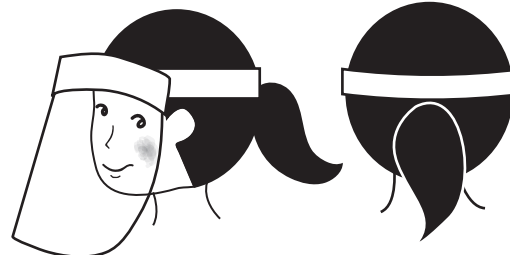

装着図：横

装着図：後

### 【素材】PET・スポンジ・ゴム



株式会社 サンウェイ

〒546-0013 大阪市東住吉区湯里5丁目18番12号



ST-56 フェイスシールド



4 526034 338996

MADE IN CHINA